

Art.-Nr. T121001

**Vertrieb durch:**

FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin

www.forlife.info



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH · 53819 Neunkirchen-Seelscheid · www.bmv-med.de

Product „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

**Anwendung**

1 Dosierlöffel Pulver in 300 ml warmem Wasser im Trachealkanülen-Behälter auflösen.

Die zerlegte Kanüle 10 – 20 Minuten in die Reinigungslösung legen.

Sekretreste vorsichtig unter fließendem Wasser entfernen.

Anschließend die Kanüle nochmals gründlich abspülen.

Nach dem Abtrocknen sollten bei Kunststoffkanülen die Innenkanülen leicht mit Stoma-Öl eingerieben werden.

**Beschreibung**

Reinigungsstark, materialschonend, hautverträglich und umweltfreundlich

**Inhaltsstoffe**

Phosphate, Silikate, Tenside, Emulgatoren, Gerüst-, und Hilfsstoffe

**Sicherheitshinweise**

Nicht einnehmen!

Nicht mit anderen Reinigern mischen!

Von Kindern fernhalten!

Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt konsultieren!

Bei versehentlichem Verschlucken Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen – Erstickungsgefahr durch Schaumbildung.

Arzt konsultieren!

**TRACHEOCUR® CLEANER**
**Reinigungspulver**

Inhalt: 400 g

**FORLIFE**  
BERLIN