

Art.-Nr. T121002

**Vertrieb durch:**

FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin

www.forlife.info


 BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH · 53819 Neunkirchen-Seelscheid · www.bmv-med.de

Product „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Hinweise zur Pflege Ihrer Trachealkanülen:

- Reinigen Sie Ihre Trachealkanülen mindestens zweimal täglich gründlich, um Infektionsrisiken zu vermeiden – bei starker Sekretbildung entsprechend öfter.
- Legen Sie, um Beschädigungen oder Verwechslungen zu vermeiden, immer nur eine Trachealkanüle in den Siebeinsatz der Kanülenreinigungsdose – Innen- und Außenkanüle nebeneinander.
- Tauchen Sie den Siebeinsatz mit der Trachealkanüle in die vorbereitete Reinigungslösung. Fassen Sie dabei den Siebeinsatz am oberen Rand an, um nicht mit der Reinigungslösung in Berührung zu kommen.
- Spülen Sie die Kanüle nach dem Ende der Einwirkzeit (siehe Gebrauchshinweise Kanülenreinigungspulver) mehrmals gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.
- Achten Sie darauf, beim Reinigen – besonders mit der Kanülenreinigungsbürste – sehr vorsichtig vorzugehen. Sobald eine Trachealkanüle scharfe Kanten oder Risse aufweist, benutzen Sie diese auf keinen Fall mehr, da es sonst zu Verletzungen der Schleimhäute in der Luftröhre kommen könnte.

TRACHEOCUR® TUB**Reinigungsdose
mit Siebeinsatz**

 FORLIFE
BERLIN